


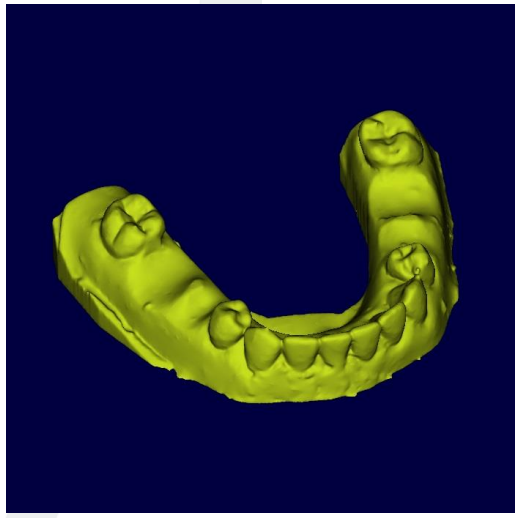


NOTA TÉCNICA 1.14

Preparo Pré-Tomográfico conceito Bioparts Implantes Parciais Sem necessidade de referência protética

<p>Passo 1:</p>  <p>Indicado para casos parciais onde não será necessária uma referência protética extra além do 3D do paciente.</p>	<p>Passo 2:</p>  <p>Moldagem do paciente com silicona de condensação utilizando moldeira de plástico. (Material: optosil – xantoprem)</p>
<p>Passo 3:</p>  <p>Verificar se a moldagem está satisfatória, sem distorções e se a silicona não descolou da moldeira.</p>	<p>Passo 4:</p>  <p>Após a Tomografia e conversão a imagem no DentalSlice ficará parecida com esta acima.</p>

Versão 1.0
Página 1/1

WWW.BIOPARTS.COM.BR