


## NOTA TÉCNICA 10.15

### Escareador Cone Morse


#### Técnica de Utilização do Escareador Cone Morse

Passo 1a:

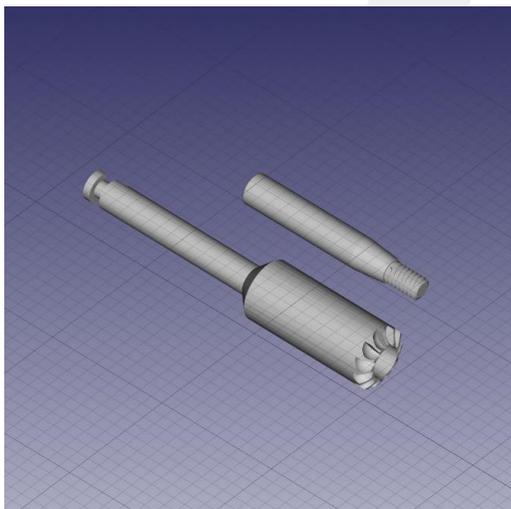


O Escareador Cone Morse Raptor consiste de 2 peças: um pino guia e o Escareador propriamente dito.

Passo 1b:

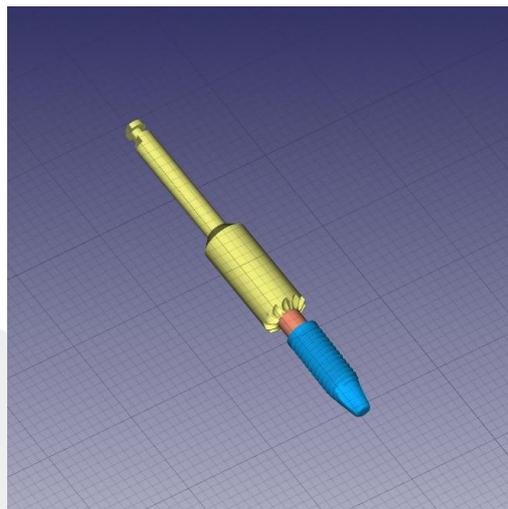


Montagem do Escareador: o pino guia se insere no implante, por onde o Escareador vai descer girando com o contra-ângulo.

Passo 2a:

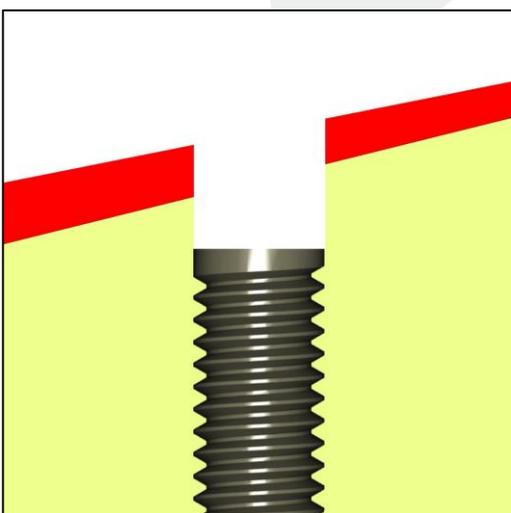

Implante CM inserido por Cirurgia Guiada (CG). Quase na totalidade das vezes existem diferenças de altura óssea, entre mesial-distal e/ou vestibulo-lingual.

Passo 2b:

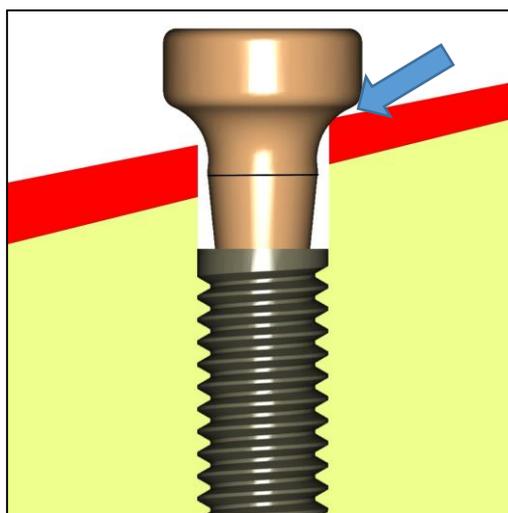

Ao colocarmos o cicatrizador regular (4.8mm de diâmetro) ele irá comprimir a gengiva, pois na CG não temos nenhum retalho de alívio.


Versão 1.0  
Página 1/4

## NOTA TÉCNICA 10.15

### Escareador Cone Morse


#### Técnica de Utilização do Escareador Cone Morse

Passo 2c:

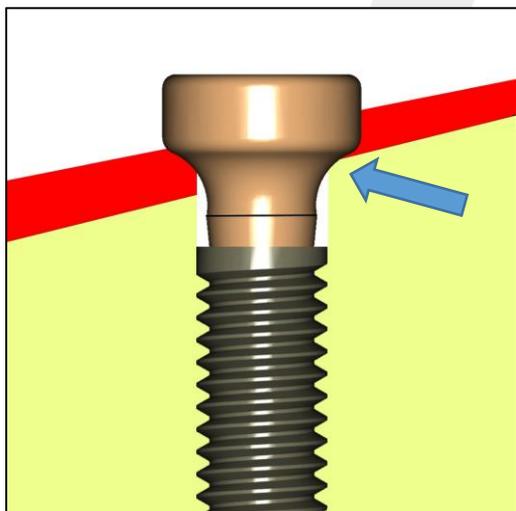


Se continuarmos pressionando e rosqueando o cicatrizador ele irá atingir uma das cristas ósseas antes de completar o encaixe correto no implante.

Passo 2d:

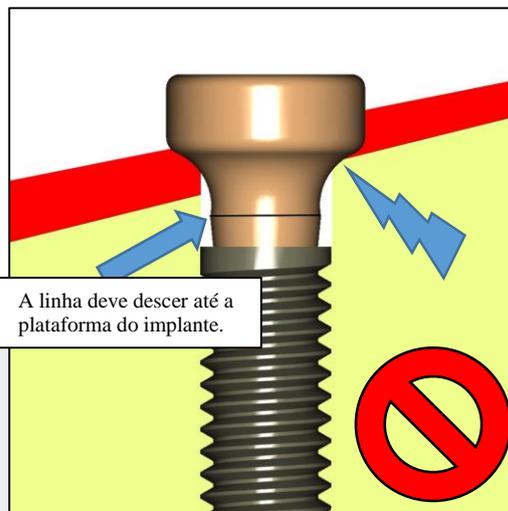


O cicatrizador irá travar! Mas não no implante, e sim na crista óssea. Logo depois, quando a crista remodelar, o cicatrizador irá afrouxar.

Passo 3a:

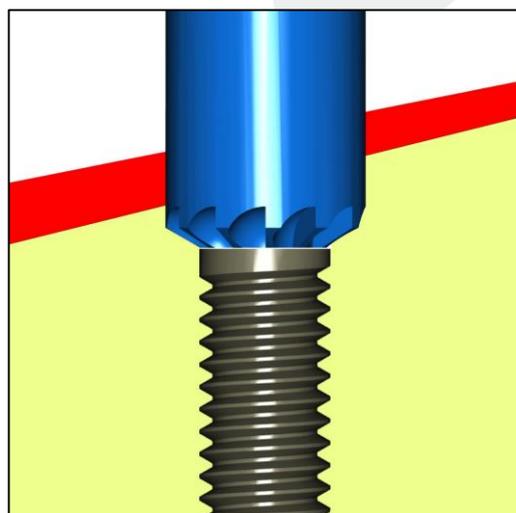

Aliviamos as interferências com o Escareador. O alívio é preciso pois o Escareador tem o mesmo diâmetro do cicatrizador e tem um "stop" para não atingir o implante.

Passo 3b:

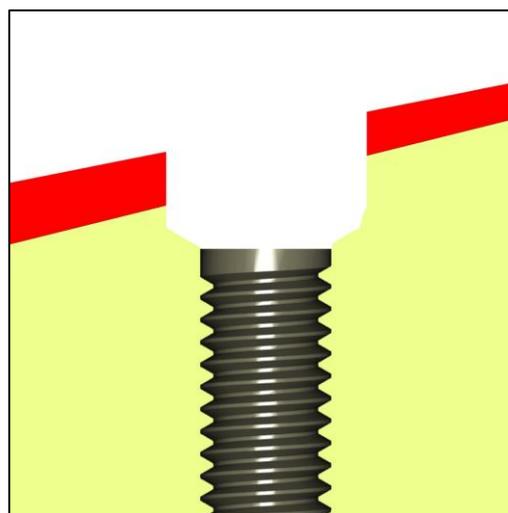

O Escareador dilata a gengiva e corta as interferências ósseas com precisão. Deixando o leito pronto para receber o cicatrizador.


Versão 1.0  
Página 2/4

## NOTA TÉCNICA 10.15

### Escareador Cone Morse


#### Técnica de Utilização do Escareador Cone Morse

Passo 4a:

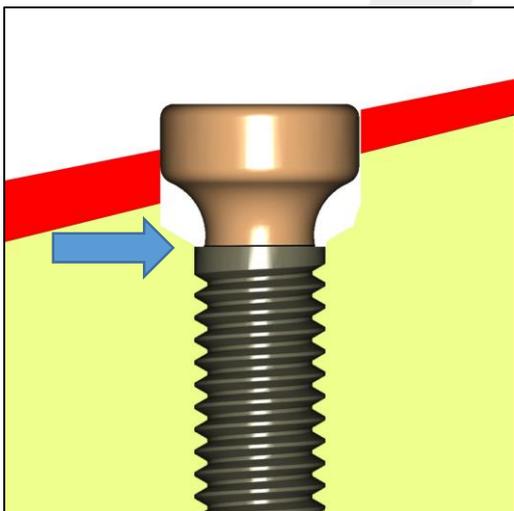

Agora podemos inserir o cicatrizador sem interferências até sua correta posição final, travando no implante.

Passo 4b:

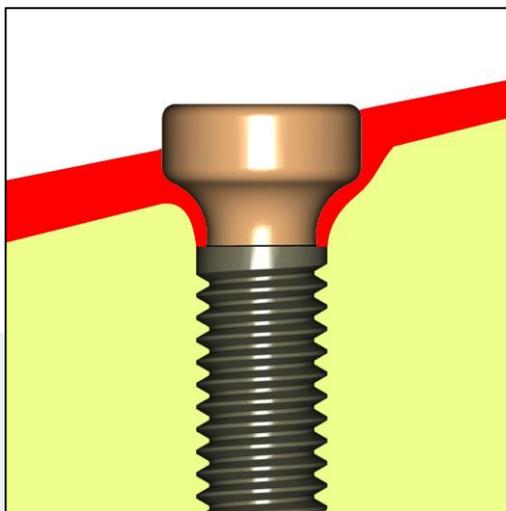

Em pouco tempo a remodelação tecidual irá completar a cicatrização e a anatomia estará pronta para receber o componente definitivo.

Passo 5a:



Utilização clínica: Com os implantes recém instalados por CG, verificamos apenas os orifícios de entrada pela gengiva.

Passo 5b:



Insira o pino guia no implante com uma chave hexagonal 1.2mm até o seu travamento final.


Versão 1.0

Página 3/4

## NOTA TÉCNICA 10.15

### Escareador Cone Morse

#### Técnica de Utilização do Escareador Cone Morse
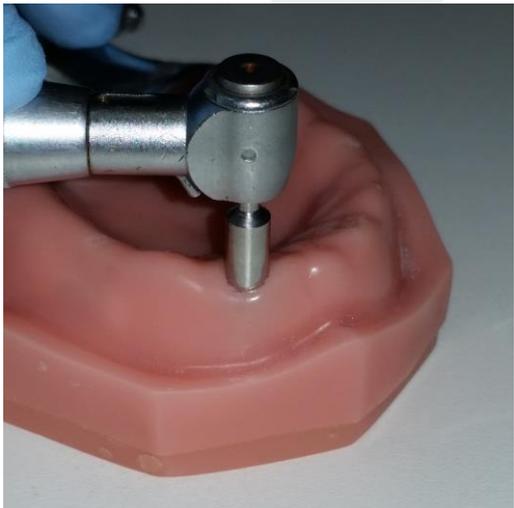
|  |  |
|--|--|
| <p>Passo 5c:</p>  <p>Pino guia do Escareador completamente instalado.</p>  | <p>Passo 5d:</p>  <p>Escareador posicionado e alinhado pelo pino guia, com o contra-ângulo</p>  |
| <p>Passo 5e:</p>  <p>Girando o contra-ângulo com irrigação abundante, pressione o Escareador até que ele atinja o stop.</p> | <p>Passo 5f:</p>  <p>Após a remoção do Escareador, o cicatrizador regular de 4.8mm de diâmetro pode ser instalado sem nenhuma interferência.</p> |

Versão 1.0

Página 4/4