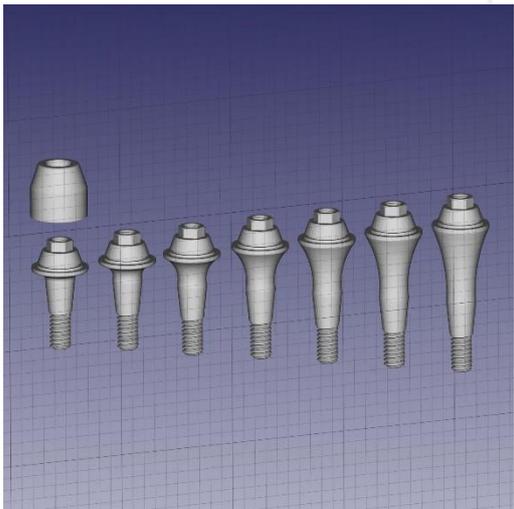
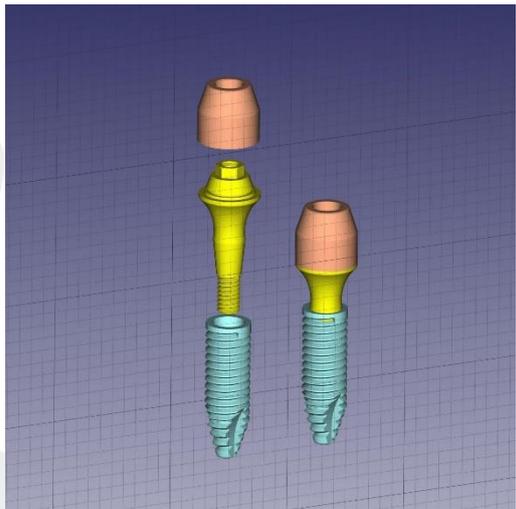
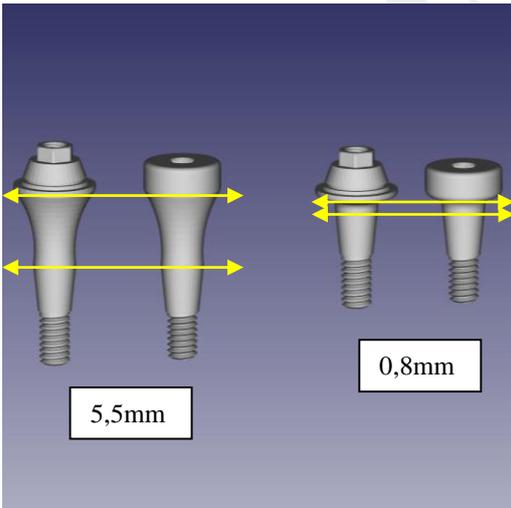
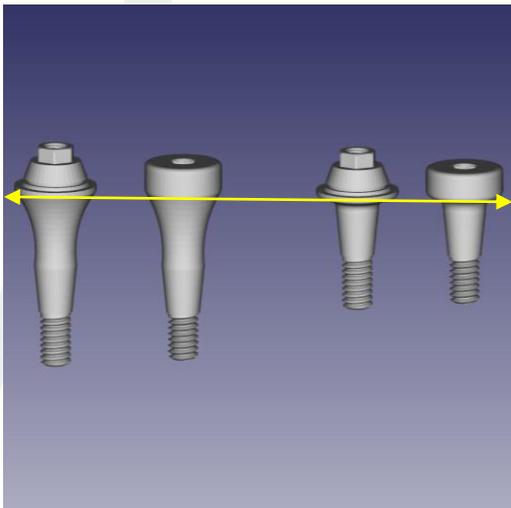


NOTA TÉCNICA 11.15

Prótese sobre Cirurgia Guiada Cone Morse Seleção e Instalação de Mini-Pilares


| | |
|---|---|
| <p>Passo 1a:</p>  <p>Os minipilares são usados para próteses múltiplas parafusadas. Disponíveis nas alturas: 0,8mm 1,5mm 2,5mm 3,5mm 4,5mm 5,5mm e 6,5mm</p> | <p>Passo 1b:</p>  <p>Montagem do minipilar no implante e com sua tampa de proteção. O minipilar regular tem um diâmetro de 4,8mm na plataforma.</p> |
| <p>Passo 2a:</p>  <p>A altura do minipilar em milímetros corresponde ao espaço entre a plataforma do implante e a plataforma do minipilar.</p> | <p>Passo 2b:</p>  <p>Repare que a plataforma do minipilar coincide com a base da cabeça do cicatrizador. Isso é muito útil para escolher a correta altura gengival.</p> |

Versão 1.0
Página 1/4

NOTA TÉCNICA 11.15


Prótese sobre Cirurgia Guiada Cone Morse Seleção e Instalação de Mini-Pilares

Passo 3a:

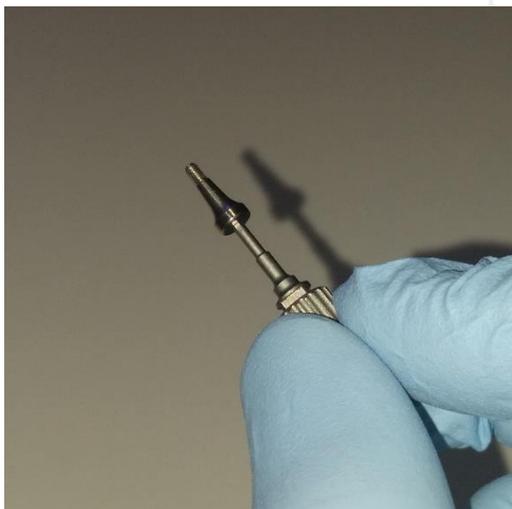


Escolha um cicatrizador regular de uma altura aproximada, não é necessária uma grande precisão nesse momento. Use a chave 1.2mm

Passo 3b:

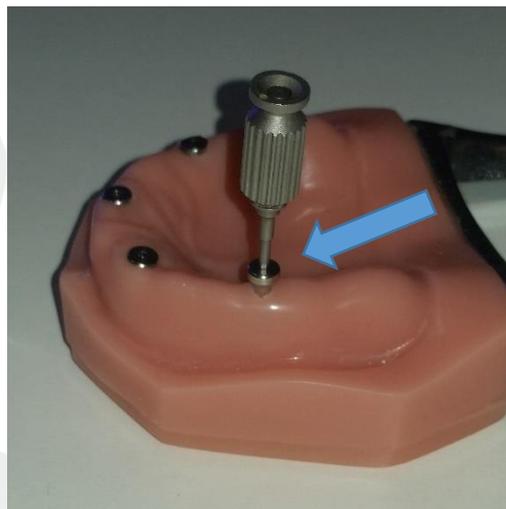


Insira o cicatrizador com pressão manual até que ele comece a rosquear no implante. Atenção, não colocar pressão excessiva.

Passo 4a:

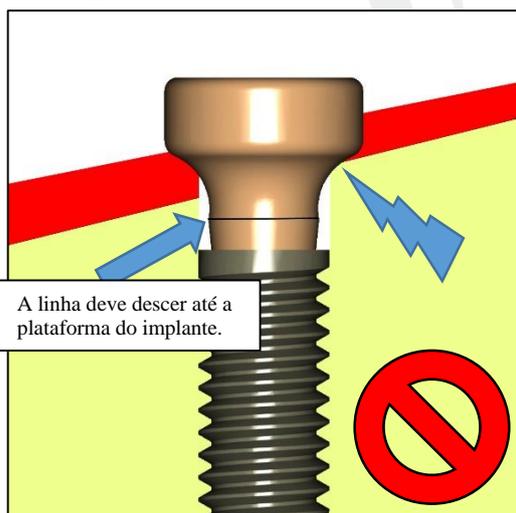

Atenção, cuidado para não travar o minipilar em uma crista óssea do paciente. Isso poderá futuramente até fraturar o componente.

Passo 4b:

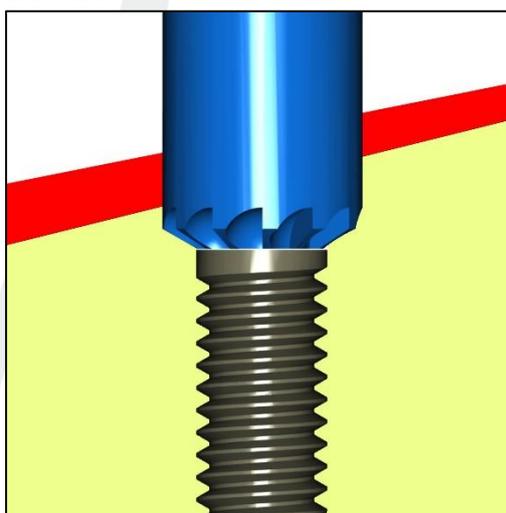

Evitamos isso usando o Escareador CM. Como a Cirurgia Guiada não abre retalho de alívio, usamos o Escareador quase **100%** das vezes. **Importante: Veja NT 10.15 – Escareador CM.**


Versão 1.0

Página 2/4

NOTA TÉCNICA 11.15


Prótese sobre Cirurgia Guiada Cone Morse Seleção e Instalação de Mini-Pilares

Passo 5a:

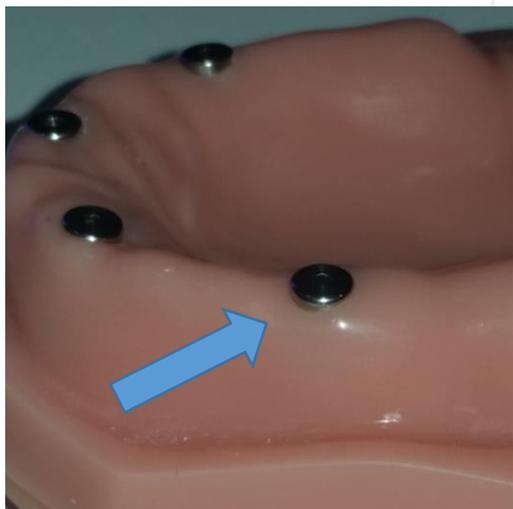


Rosqueie o cicatrizador até que ele trave no implante. A altura ideal dele é quando a base da cabeça está sub-gengival e o topo supra-gengival.

Passo 5b:

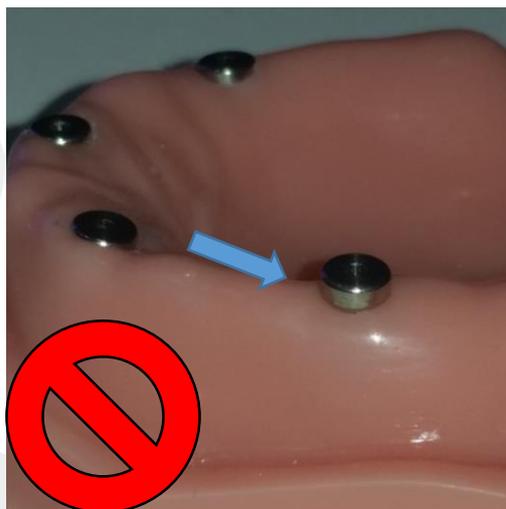

Neste caso, o cicatrizador ficou alto demais, com a base da cabeça supra gengival. Se isso acontecer, remova-o e instale outro menor

Passo 5c:

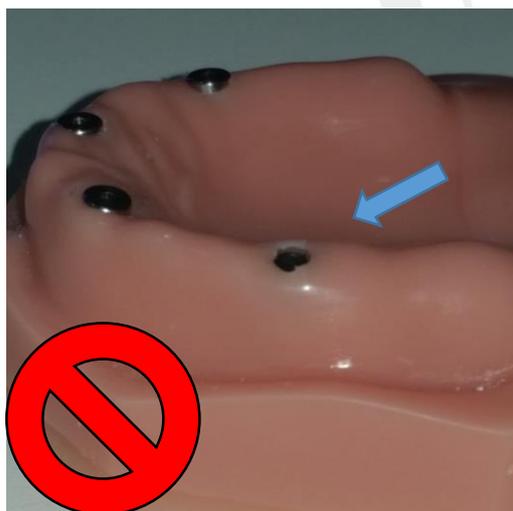

Neste caso, o cicatrizador ficou baixo demais, com o topo da cabeça sub-gengival. Se isso acontecer, remova-o e instale outro maior

Passo 6:



Uma vez escolhido o cicatrizador, remova-o e selecione um minipilar de igual tamanho.

Versão 1.0
Página 3/4

NOTA TÉCNICA 11.15


Prótese sobre Cirurgia Guiada Cone Morse Seleção e Instalação de Mini-Pilares

Passo 7a:




Com uma chave de instalação de minipilar, rosqueie manualmente até sentir uma resistência, então use a catraca para dar 30N de torque.

Passo 7b:

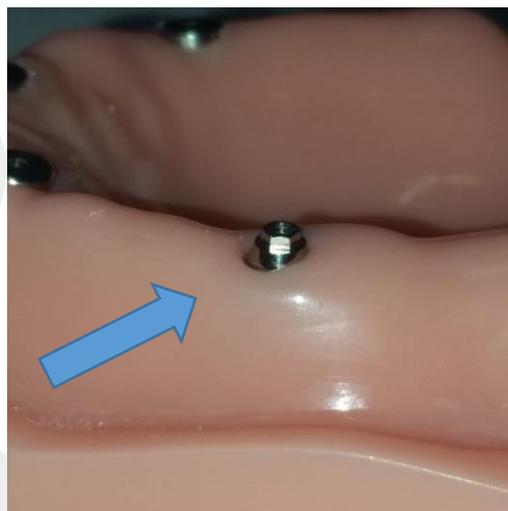

O minipilar completamente instalado ficará com sua plataforma levemente sub-gengival, permitindo uma boa higiene e estética.

Passo 8:

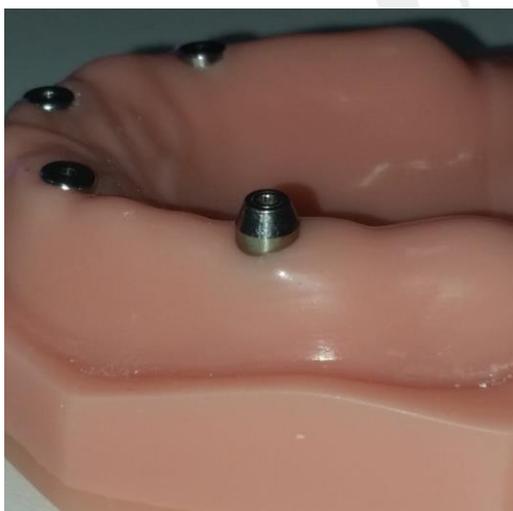

Rosqueie então a Tampa de Proteção do Minipilar para que a gengiva não suba sobre a plataforma do Minipilar e dificulte os procedimentos futuros.

Passo 9:



Repita os passos para todos os implantes remanescentes.

Versão 1.0
Página 4/4