

NOTA TÉCNICA 2.14

Preparo Pré-Tomográfico conceito Bioparts Implantes Parciais Com necessidade de referência protética Usando um Provisório Removível

Passo 1a:



Indicado para casos parciais onde precisa-se de uma referência protética extra além do 3D do paciente, e este tem uma provisória.

Passo 1b:



Neste caso, a prótese provisória é removível e contém as informações de localização e forma dos dentes a serem implantados

Passo 2:



Moldagem do paciente **usando** a provisória com silicona de condensação utilizando moldeira de plástico. (optosil – xantoprem)

Passo 3a:



Remoção da moldeira, na maioria das vezes o provisório removível fica preso na moldagem.

NOTA TÉCNICA 2.14

Preparo Pré-Tomográfico conceito Bioparts Implantes Parciais Com necessidade de referência protética Usando um Provisório Removível

Passo 3b:



Remoção do provisório da moldagem, repare que os espaços referentes aos dentes do provisório ficam vazios.

Passo 4:



Mistura do Silix com o catalizador do material de moldagem. **Utilizar 2x mais** catalizador para otimizar o tempo de trabalho.

Passo 5a:



Com a seringa de moldagem, inserir o Silix **somente** no espaço dos dentes que eram do provisório.

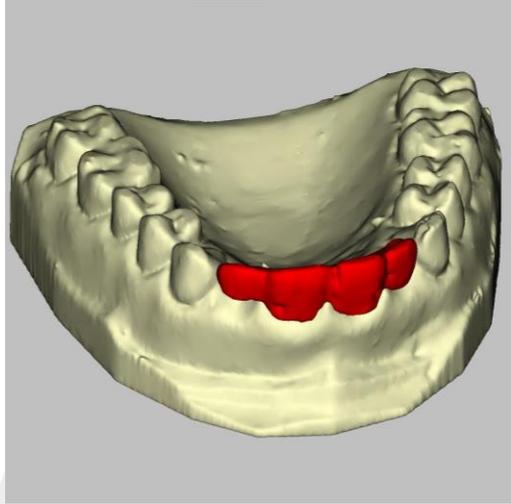
Passo 5b:



O espaço deve ficar bem preenchido com Silix **sem invadir** os espaços vizinhos para **não causar interferência** nos dentes do paciente

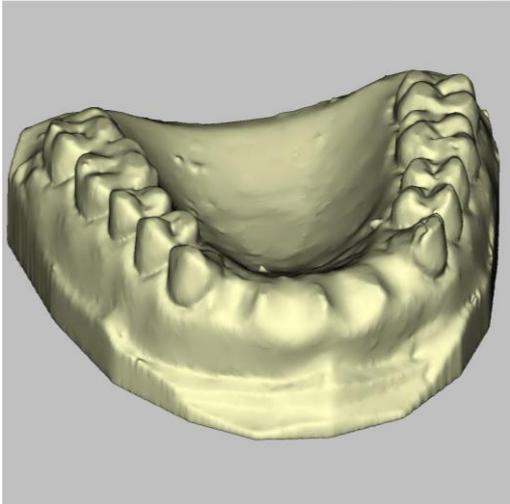
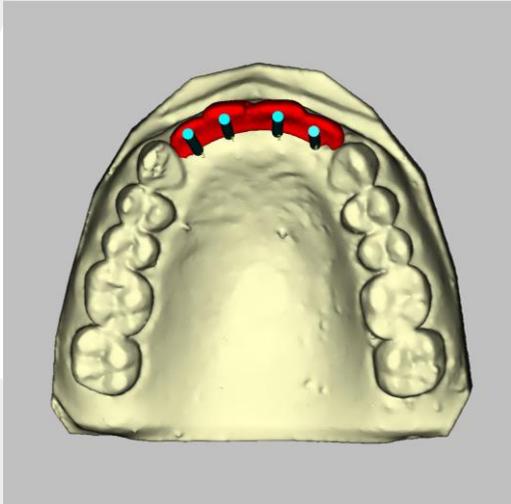
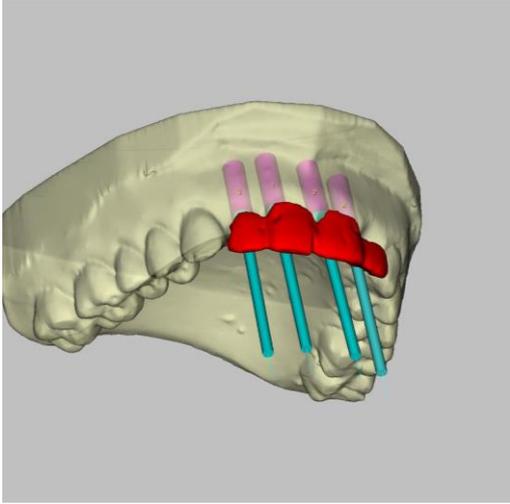
NOTA TÉCNICA 2.14

Preparo Pré-Tomográfico conceito Bioparts Implantes Parciais Com necessidade de referência protética Usando um Provisório Removível

<p>Passo 6a:</p>  <p>Reembasamento da moldagem com silicona fluida no paciente sem estar usando a provisória. Material: (Optosil – Xantoprem)</p>	<p>Passo 6b:</p>  <p>Verificar se a moldagem está satisfatória, não tendo imperfeições e não tendo descolado da moldeira.</p>
<p>Passo 6c:</p>  <p>O aspecto final da moldagem deve copiar a boca do paciente sem a provisória, onde encaixará a guia cirúrgica.</p>	<p>Passo 7a:</p>  <p>Após a Tomografia e Conversão a imagem no DentalSlice ficará parecida com esta acima.</p>

NOTA TÉCNICA 2.14

Preparo Pré-Tomográfico conceito Bioparts Implantes Parciais Com necessidade de referência protética Usando um Provisório Removível

<p>Passo 7b:</p>  <p>Imagem do DentalSlice, removendo o Silix.</p>	<p>Passo 7c:</p>  <p>Planejamento dos Implantes levando em conta a referência protética.</p>
<p>Passo 7d:</p>  <p>Planejamento dos Implantes levando em conta a referência protética.</p>	