

NOTA TÉCNICA 2.15

Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando uma Prótese Total marcada

Passo 1a:




Indicado para casos totais onde o paciente está portando uma prótese total marcada.

Passo 1b:




Verifique se o paciente está portando uma prótese total e se ela tem as marcações de guta-percha. (N.T. 3.14)

Passo 2a:

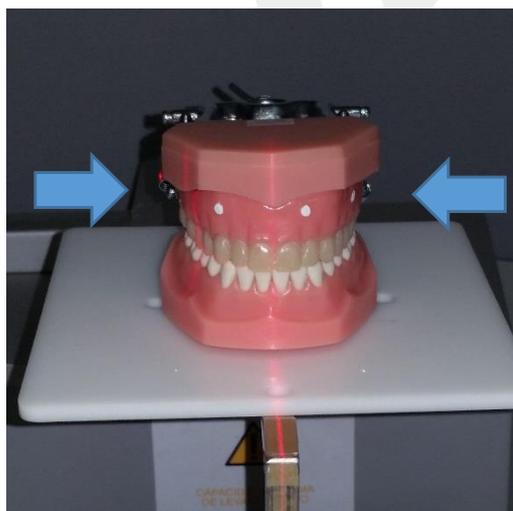

Posicione o paciente no tomógrafo para que fique centralizado no sentido **latero-lateral**. Para que todo o arco seja incluído na TC.

Passo 2b:

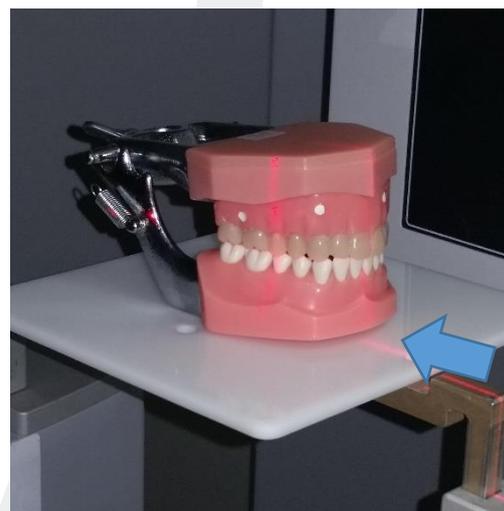


Centralize também no sentido **ântero-posterior**, com a linha da oclusão paralela ao Tomógrafo.

NOTA TÉCNICA 2.15

Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando uma Prótese Total marcada

Passo 2c:

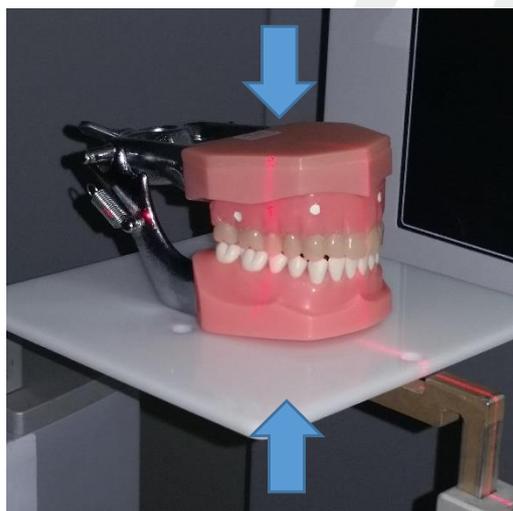


Centralize o arco do paciente **verticalmente** para maximizar a altura da anatomia incluída na TC.

Passo 3a:



O Paciente deverá realizar o exame em **oclusão completa**, para que a prótese fique bem adaptada no rebordo.

Passo 3b:

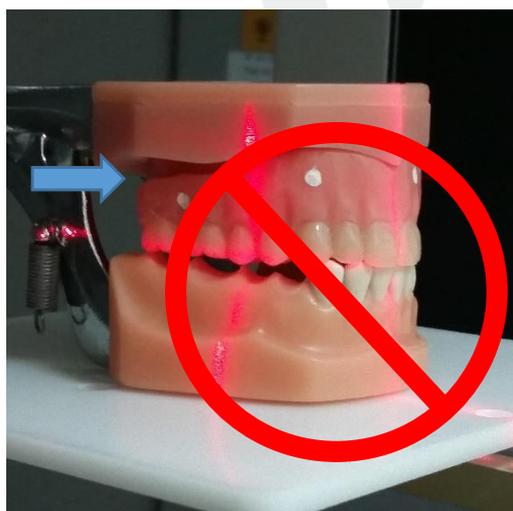

A prótese **não pode descolar** do rebordo no momento em que o paciente trava os dentes. Para solucionar isso ver **N.T 6.14** e **N.T 4.15**

Passo 4:




Realize a aquisição da imagem seguindo o protocolo do seu tomógrafo. Em seguida grave as imagens **axiais** em formato DICOM.

NOTA TÉCNICA 2.15


Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando uma Prótese Total marcada

Passo 5a:

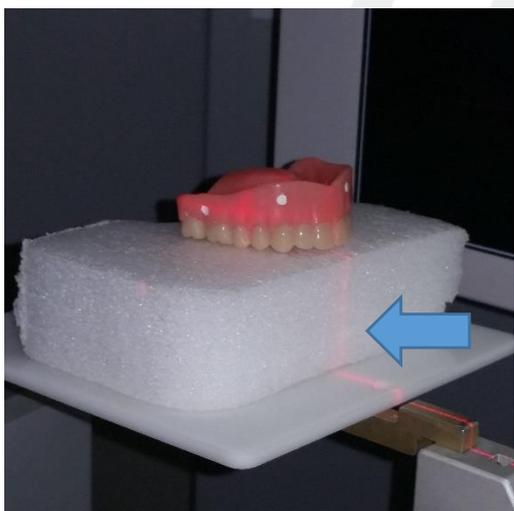


Coloque a **prótese** no aparelho, use uma base de isopor para ajudar na posição e **evitar os artefatos** da estrutura do tomógrafo

Passo 5b:

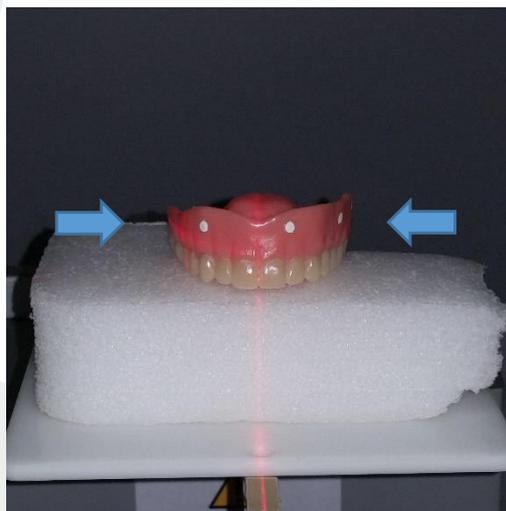


Posicione a **prótese** no tomógrafo para que fique centralizado no sentido **lâtero-lateral**. Para que toda a prótese seja incluída na TC.

Passo 5c:

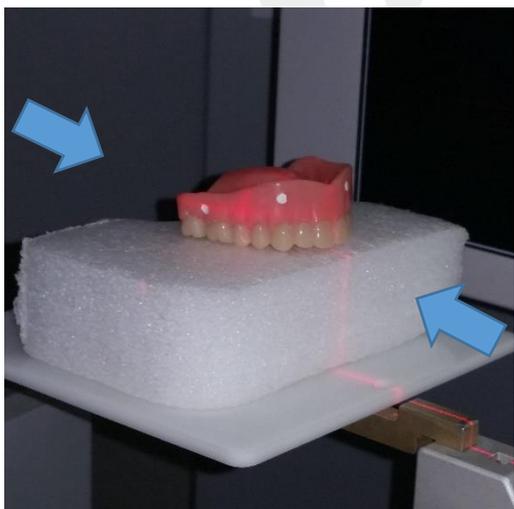

Centralize também no sentido **ântero posterior**, com os dentes da prótese paralelos à base do Tomógrafo.

Passo 5d:

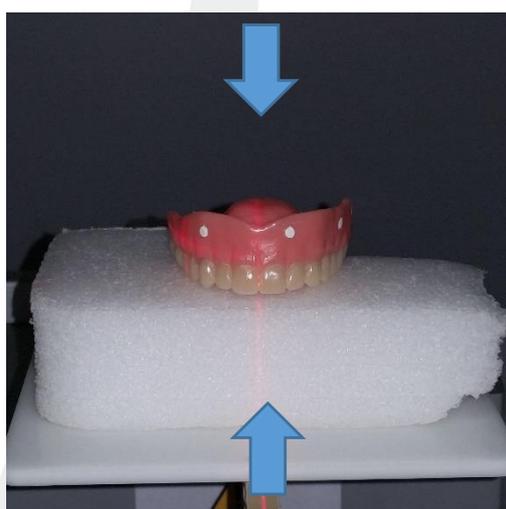

Centralize **verticalmente** para incluir toda a **prótese** na TC.

NOTA TÉCNICA 2.15

Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando uma Prótese Total marcada

Passo 6:



Realize a aquisição da imagem seguindo o protocolo do seu tomógrafo. Em seguida grave as imagens **axiais** em formato DICOM.

Versão 1.0
Página 4/4